

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION



### ASSUREZ-VOUS QUE VOS MAINS SONT PROPRES ET DÉSINFECTÉES AVANT DE TOUCHER LE MASQUE

- 1) Posez le masque avec le clip nasal en haut et aplatissez-le, puis tirez sur les élastiques pour les placer derrière les oreilles.
- 2) Tenez le masque sous votre menton, puis soulevez-le pour couvrir votre bouche et votre nez.
- 3) Tirez les élastiques derrière les oreilles avec les deux mains et ajustez pour le meilleur confort.
- 4) À l'aide des deux mains, ajustez la forme de la languette nasale afin qu'elle épouse la forme de votre nez pour un meilleur ajustement (ne le faites pas d'une seule main ! Cela affectera l'étanchéité du masque).
- 5) Appuyez le masque sur votre visage et expirez vigoureusement. Si de l'air s'échappe de n'importe où sur le périmètre du masque, réajustez jusqu'à ce que l'étanchéité soit obtenue.

**REMARQUE :** Le masque peut être utilisé pour un shift de travail ou plusieurs fois sur différents jours jusqu'à 8 heures au total ; assurez-vous toujours qu'il soit stocké dans un sac scellé et que toute manipulation soit toujours effectuée avec des mains propres et désinfectées.

### AVERTISSEMENTS :

- PAS pour usage medical
- PAS pour les enfants de moins de 10 ans
- NE PAS utiliser dans des environnements où la concentration d'oxygène est inférieure à 17%
- NE PAS utiliser dans un environnement de gaz toxiques
- NE PAS utiliser avec la barbe ou tout autre chose sur le visage qui interfère avec le contact direct entre le masque et la peau ; rasez-vous soigneusement



Produit par SuspireSwiss SA

usine de Via Penate 10

CH-6852 Mendrisio (Suisse)