

GEBRAUCHSEINWEISUNG



STELLEN SIE SICHER, DASS IHRE HÄNDE SAUBER UND DESINFIZIERT SIND, BEVOR SIE DIE MASKE ANFASSEN

- 1) Öffnen Sie die Maske mit dem Nasenbügel nach oben und legen Sie sie flach, ziehen Sie dann an den Ohrschlaufen
- 2) Halten Sie die Maske unter Ihr Kinn und heben Sie sie dann an, um Ihren Mund und Ihre Nase zu bedecken
- 3) Ziehen Sie die Ringe mit beiden Händen hinter die Ohren und stellen Sie sie für den besten Komfort ein.
- 4) Stellen Sie mit beiden Händen die Form des Nasenpolsters so ein, dass es sich der Form Ihrer Nase optimal anpasst (nicht mit einer Hand! Dies beeinträchtigt die Abdichtung der Maske).
- 5) Drücken Sie die Maske auf Ihr Gesicht und atmen Sie kräftig aus. Wenn an irgendeiner Stelle am Umfang der Maske Luft austritt, passen Sie die Maske wieder an, bis sie richtig abgedichtet ist.

ANMERKUNG: Die Maske kann für eine Arbeitsschicht oder mehrmals an verschiedenen Tagen bis zu insgesamt 8 Stunden verwendet werden; bei letzterem ist darauf zu achten, dass sie in einem versiegelten Beutel aufbewahrt wird und das An- und Ausziehen immer mit sauberen und desinfizierten Händen erfolgt

WARNUNGEN:

- o NICHT für medizinischen Gebrauch
- o NICHT für Kinder unter 10 Jahren
- o NICHT zur Verwendung in Umgebungen, in denen die Sauerstoffkonzentration unter 17 % liegt
- o NICHT zur Verwendung in einer Umgebung mit toxischen Gasen
- o NICHT mit Bärten oder anderen Gesichtshaaren verwenden, die den direkten Kontakt zwischen der Maske und Ihrer Gesichtshaut stören; rasieren Sie Ihr Gesicht sorgfältig!



Hergestellt von SuspireSwiss SA
in der Fabrik in Via Penate 16
CH-6852 Mendrisio (Schweiz)