

SUSPIRE MASCHERA FACCIALE FFP2

ISTRUZIONI PER L'USO



ASSICURATEVI CHE LE VOSTRE MANI SIANO PULITE E SANIFICATE PRIMA DI MANEGGIARE LA MASCHERA

- 1) Aprire la maschera con la clip per il naso in alto e appiattirla, quindi tirare i passanti per le orecchie.
- 2) Tenere la maschera sotto il mento e poi sollevarla per coprire la bocca e il naso.
- 3) Tirare gli elastici dietro le orecchie con entrambe le mani e regolarli per il miglior comfort.
- 4) Con entrambe le mani, regolare la forma del nasello in modo che si adatti alla forma del vostro naso per la migliore aderenza (non farlo con una mano sola! Questo influirà sulla tenuta della maschera).

Premete la maschera sul viso ed espirate vigorosamente. Se l'aria fuoriesce da qualsiasi punto del perimetro della maschera, regolare nuovamente fino a quando non si ottiene una tenuta adeguata.

NOTA: la maschera può essere utilizzata per un turno di lavoro o più volte in giorni diversi fino a 8 ore in totale; in quest'ultimo caso assicurarsi che sia conservata in un sacchetto sigillato e che la vestizione e lo svestimento siano sempre eseguiti con mani pulite e igienizzate.

AVVERTENZE:

- o NON per uso medicale
- o NON adatto a bambini sotto i 10 anni
- o NON utilizzabile in ambienti con concentrazione di ossigeno inferiore al 17 %
- o NON utilizzabile in ambienti con presenza di gas tossici
- o NON utilizzare con la barba lunga o altri peli facciali che interferiscono con il contatto diretto tra la maschera e la pelle del viso. Radersi accuratamente!



Prodotto da SuspireSwiss SA
nello stabilimento in Via Penate 16
Mendrisio (Svizzera)